


鼻水吸引キットご使用のヒント

ボトルを使った吸引

- 吸引圧は-40kPa以下でご使用ください。

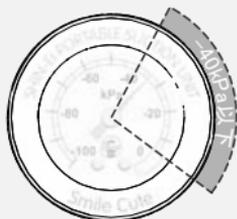


ボトルには吸引ホースへの流入を防ぐトラップ構造を設けておりますが、高い吸引圧で使用するとトラップを超えて、吸引ホースへ流入しやすくなります。ボトルを使った吸引では、設定する吸引圧を-40kPa以下にさせていただくことで、トラップ構造が有効に機能し、吸引ホースへの流入を減らせます。

- ホースを折り曲げ、圧を高めてからの吸引が効果的。



ジョイントを使った吸引

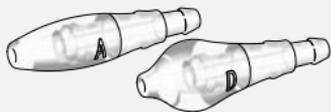

- 高流量吸引。

ボトルを使った吸引では流量・吸引圧が物足りなく感じる場合は、ジョイントを使った吸引をお試しください。

吸引物は吸引器本体の吸引瓶にためることになりますが、ボトルにあるトラップ構造がないため流量をロスすることなく、吸引器の能力をフルに引き出せます。

オリブロングについて



- カテーテルより簡単です。

オリブロングの先端径は3.3mmです。これは一般的な吸引カテーテルの10Frタイプと同等です。



使い方動画はこちら