

COMFORT 3000 KU-500

Ultrasonic Nebulizer

販売名：超音波ネブライザー COMFORT 3000
届出番号：11B1X00009000012

コンパクト、軽量で連続運転が可能



COMFORT 3000 KU-500




価格 ¥60,000 (税抜)

製品仕様

型式: KU-500	薬液カップ容量: 最大 100mL
一般的名称: 超音波ネブライザ	作用水容量: 約 200mL
噴霧粒子径: MMAD 約 5.5μm	寸法: W260×D145×H195mm
噴霧能力: 約 3.5mL/分 (送風量 3、霧化量 5 設定時) 約 0.7mL/分 (送風量 1、霧化量 1 設定時)	質量: 約 2.4kg
連続運転: 可能	電源: AC100V 50-60Hz
最大送風量: 16L/分	付属品: 耐熱送気ホース、ネブライザマスク (大)、マウスピース、電源コード、フック

交換部品及びオプション

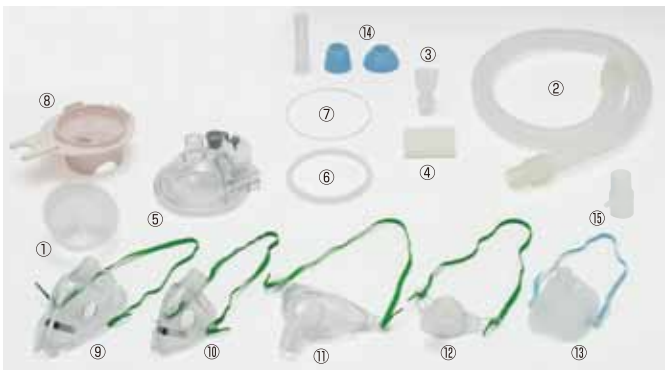

①薬液カップ 5個	18030-003A	140030121	¥2,200
②耐熱送気ホース (カフ付) 100cm	1H055-00	140030122	¥3,000
③マウスピース 5個	P-363	200191182	¥1,000
④エアフィルター 5個	18090-001A	140030202	¥700
⑤霧化室パッキン付	18090-004A	140030201	¥1,900
⑥霧化室パッキン 5枚	18030-0011A	140030129	¥1,900
⑦作用槽パッキン 5枚	18030-0010A	140030128	¥1,200
⑧カップホルダー (フック付)	18090-005A	140030204	¥800
⑨ネブライザマスク 大	NK-3250	400010041	¥380
⑩ネブライザマスク 小	NK-3250	400010040	¥380
⑪トラキアマスク 大	NK-5202	400010086	¥900
⑫トラキアマスク 小	NK-5201	400010087	¥900
⑬マスク 小	18030-005A	140030123	¥1,200
⑭少量霧化キャップセット	18030-008A	140030135	¥900
⑮酸素導入プラグ	1K121-00	140030045	¥1,200
帯電フィルター	18090-002A*	140030203	¥3,000

*静電気力により、空気中に浮遊する 1μm 以下の微粒子も効果的にカット

特長

送風・霧化量の調節

送風量は 3 段階、霧化量は 5 段階の調節ができますので、患者様にあった吸入が可能です。

連続運転が可能

オプション品の薬液連続瓶を使用することにより、連続運転が可能です。

※連続霧化可能目安時間: 500mL: 約 2 時間 15 分 / 1000mL: 約 4 時間 30 分 / 2000mL: 約 9 時間


コンパクトで軽量

コンパクトなので置き場所に困りません。また、約 2.4kg と軽量なので持ち運びもラクラクです。

お手入れが簡単

触れる機会が多い操作パネルがフラットなので、拭き洗浄が容易です。

操作パネルの説明

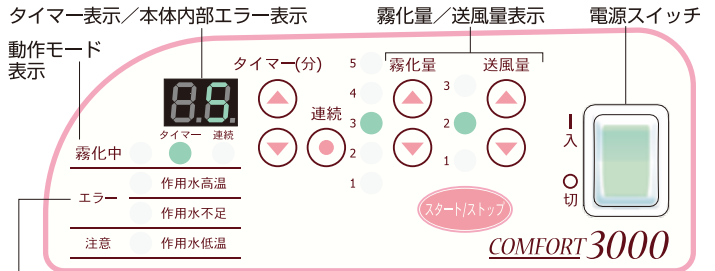

エラー/注意表示

作用水高温エラー表示: 作用水が熱くなっています。新しい作用水に交換してください。
作用水不足エラー表示: 作用水が不足しています。水位線まで水を入れてください。
作用水低温注意表示: 室温または水温が低い状態です。

オプション



本体・薬液連続瓶・蛇管・マスクは別売

コンフォート 3000 専用カート

- 120023007 ¥37,000
- 寸法: W350×D315×H920 ~ 1666 ※
※ガードルを最大まであげた高さ
- キャスター: 前輪φ75 後輪φ100 (ストッパー付)



長時間の薬液吸入が可能です。
薬液連続瓶セット (クリップ付)
500mL 140030049
1000mL 140030030
2000mL 140030044 ¥8,000
●材質: プラスチック製



酸素吸入をしながら薬液吸入が可能です。
酸素導入プラグ
140030045 ¥1,200
※ホースは別途ご用意下さい。

新鋭工業株式会社

本社 〒362-0055 埼玉県上尾市平方領領家 308-2

東京支店	〒113-0033 東京都文京区本郷 3-12-5	TEL.03(3816)0444	FAX.03(3816)0406
大阪支店	〒541-0042 大阪府中央区今橋 1-6-1	TEL.06(6228)3311	FAX.06(6228)3321
札幌支店	〒060-0907 札幌市東区北七条東 4 丁目 28-3	TEL.011(741)7752	FAX.011(753)2703
仙台支店	〒984-0042 仙台市若林区 6 丁目の中町 10-10	TEL.022(288)4660	FAX.022(288)4661
新潟支店	〒951-8136 新潟市中央区関屋田町 1-1	TEL.025(233)0592	FAX.025(233)0573
長野支店	〒390-0835 長野県松本市高宮東 5-1-3	TEL.0263(24)2840	FAX.0263(27)3152
名古屋支店	〒466-0023 名古屋市中区石仏町 2-1-40	TEL.052(859)1333	FAX.052(859)1334
山陰支店	〒683-0001 鳥取県米子市皆生温泉 2-20-27	TEL.0859(34)5675	FAX.0859(34)5708
岡山支店	〒700-0982 岡山市北区中島田町 1-7-8	TEL.086(235)0323	FAX.086(235)0324
広島支店	〒733-0822 広島市西区康平中 4-10-36	TEL.082(275)0740	FAX.082(275)0760
福岡支店	〒813-0034 福岡市東区多の津 5-11-25	TEL.092(622)0055	FAX.092(622)0052
沖縄支店	〒901-2103 沖縄県浦添市仲間 1-19-6	TEL.098(876)4262	FAX.098(876)6097

ホームページアドレス <http://www.shinei.me>
※製品は改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。



注意 正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず取扱説明書をお読みください。